

# Comment ouvrir les nouveaux sachets GTB



1. Maintenir fermement l'embout entre le pouce et l'index d'une main et le bord du sachet entre le pouce et l'index de l'autre main.



2. Tirer le bord du sachet vers le bas et perforer la membrane pour exposer l'embout.



3. Dégager l'embout en repoussant la pellicule plastique.



4. Fixer le raccord de la sonde sur l'embout en appliquant un mouvement de rotation pour faciliter l'opération.



5. Raccorder l'autre extrémité du raccord à la sonde et soulever le sachet pour débuter l'insémination.

Le sachet s'aplatira durant l'insémination; pas besoin de faire d'ouverture, le sachet se videra facilement de lui-même.

